
SERINGA INJECTOMAT ÂMBAR



BRL9000731 / 9000731 - Seringa Injectomat Âmbar

VERSÃO DE INSTRUÇÃO DE USO: BR9000731/V00

REVISADO EM: 27/08/2021

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, VERIFIQUE O NÚMERO DA INSTRUÇÃO DE USO E A VERSÃO CORRESPONDENTE NA EMBALAGEM DO PRODUTO



PARA OBTER AS INSTRUÇÕES DE USO (IFU) TAMBÉM EM FORMATO IMPRESSO, SEM CUSTO ADICIONAL, CONTATAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR ATRAVÉS DO SAC 0800-707-3855 OU ATRAVÉS DO E-MAIL FRESENIUS.BR@FRESENIUS-KABI.COM

MODO DE USO DO PRODUTO

1. Abra a embalagem através da técnica asséptica;
2. Se a cânula não estiver conectada, conecte esta na seringa antes do uso. Mantenha a agulha coberta com o protetor até o momento do uso para evitar danos à ponta e contaminação da agulha;
3. prossiga com a aspiração do conteúdo a ser infundido, respeitando as recomendações de assepsia de seu local de trabalho;
4. Após preencher a seringa com o conteúdo necessário, remova a cânula da mesma, de forma que a seringa possa ser encaixada corretamente na bomba de infusão.

ATENÇÃO

Cuidado na hora de descartar a cânula. Recoloque o protetor nas agulhas utilizando técnica passiva de recolocação, isto é, não segurando o protetor da agulha durante a recolocação, e não forçando-o contra a ponta da agulha, evitando que esta penetre o protetor.

Siga as recomendações do serviço de saúde para a prevenção de acidentes com perfurocortantes.

5. Ao terminar o procedimento de infusão, a seringa também deve ser descartada em local adequado, conforme requisitos da legislação sanitária vigente, e recomendações do serviço de saúde.
-

SERINGA INJECTOMAT ÂMBAR

PRECAUÇÕES RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O PRODUTO, BEM COMO SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

- Não utilizar após a data de validade.
- Produto médico de uso único.
- Este dispositivo é estéril.
- Proibido reprocessar.
- Destruir após o uso.
- Manter em temperatura ambiente e em local protegido da umidade.
- Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada ou danificada.

ATENÇÃO

A cânula da seringa Injectomat deve ser utilizada somente para aspiração de medicamento para preenchimento da seringa. Não é permitido seu uso para administração da medicação no paciente, o mesmo será administrado através de bomba de infusão com o uso de extensores que se conectam ao acesso venoso.

INDICAÇÕES:

As seringas Injectomat Âmbar são indicadas para o uso com bombas de infusão de seringa. São seringas de uso único para infusão de drogas fotossensíveis e podem ser utilizadas com extensores para infusão em Bomba de Seringa.

São dispositivos para infusão compatível com bombas de seringa com o uso de extensores / perfusores.

CONTRAINDICAÇÕES:

- Não se aplica.

FABRICADO POR:

Fresenius Kabi AG

Else Kröner-Str. 1
61352, Bad Homburg
Alemanha

IMPORTADO / DISTRIBUÍDO POR

Fresenius Kabi Brasil Ltda.

Av. Marginal Projetada, 1652
Barueri-SP
C.N.P.J. 49.324.221/0001-04
SAC: 0800 707 3855

SERINGA INJECTOMAT ÂMBAR

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Cíntia Motta Pereira Garcia
CRF-SP: 34.871

Registro ANVISA nº 80145119023

Estéril – Óxido de Etileno

Produto de uso único. Proibido reprocessar

Manter em temperatura ambiente, protegido de umidade e da luz solar.

Lote, Data de fabricação e Data de validade: vide rótulo do produto.

Saúde

