


사이즈 : 130x210


일회용 의료기기, 제사용 금지

## ATR120 reservoir

**■ 제품명 :** ATR120 reservoir

**■ 품목명 :** 심폐용혈액저장조

**■ 모델명 :** 9308471

**■ 허가번호 :** 수인 10-4330 호

**■ 사용목적 :** 순환 혈액을 일시적으로 저장하는 기구

**■ 사용방법**


가. 사용 전 준비사항

- 제품 및 최초포장에 손상이 있는지 확인하고, 손상이 있을 경우 사용하지 않는다.
- 제품 포장에 인쇄되어있는 설명서를 숙지하여 사용한다.

나. 사용방법

- ATR120 Reservoir 설치하기
  - 본 심폐용혈액저장조를 포장용기에서 조심스럽게 꺼낸다.
  - CATSmart 자동혈액회수제주입장치의 ASM-Autostart Reservoir Holder cp[수위 17-182 호] 또는 C.A.T.S 자동혈액회수제주입장치의 IV플 아랫부분 및 Reservoir Holder[수위 06-433 호]에 고정한다.
- 항등고제 넣기
  - 혈액흡인 전 혈액응고를 방지하기 위해, 해피린 처리된 생리식염수 200mL를 넣는 것을 권장한다.
  - 비워지거나 필요(응고형성) 시에 200mL씩 추가하도록 한다.
- ATS Suction Line 연결하기
  - 항류로부터 혈액을 수집하기 위하여, ATS Suction Line을 혈액 주입구(외관설명 7 또는 8)에 연결한다.
- Vacuum Set 연결하기
  - 진공프로브부터의 진공압을 전달하여 혈액의 수집이 이루어 질 수 있도록, ATV-70 Vacuum Line[수위 17-182 호]을 진공 커넥터(외관설명 11)에 연결한다.
- AT3 Autotransfusion Set[수인 17-4217 호] 또는 AT1 Autotransfusion Set[수인 17-4217 호] 연결하기
  - 수집된 혈액이 세척단계로 누설 없이 이동할 수 있도록, 혈액 배출 노즐(외관설명 16)에 AT3 또는 AT1 커넥터의 커넥터를 연결한다.
- 혈액 수집하기
  - 제차 프로그램을 시작하기 전, 약 500mL 혈액을 흡인하여 수집하기를 권장한다.
- CATSmart 또는 C.A.T.S 자동혈액회수제주입장치에서 환자 상태에 적합한 세척 프로그램을 선택하여 작동한다.

**(외관설명)**

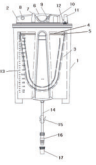

번호	품명
1	AT3 커넥터
2	AT1 커넥터
3	혈액 배출 노즐
4	진공 커넥터
5	진공 커넥터
6	중공부
7	혈액 주입구
8	혈액 주입구
9	혈액 주입구
10	혈액 주입구
11	진공 커넥터
12	진공 커넥터
13	진공 커넥터
14	진공 커넥터
15	진공 커넥터
16	혈액 배출 노즐
17	혈액 주입구

다. 사용 후 보관 및 관리방법

- 일회용 제품이므로 재사용을 금한다.

**■ 사용시 주의사항**

가. 경고

- ATR120 Reservoir는 Operating Instruction에 언급된 소모품과 여러 장비 및 액세서리들과 함께 사용될 수 있도록 시험되고 승인되었다. 조작자나 책임 기관은 Operating Instruction에 언급하고 있는 소모품, 여러가지 장비 및 액세서리의 사용해야 하며, 책임기관에서는 적합성을 확인할 의무가 있다.
  - (예를 들어, 제조자로부터 권고된 장비는 승인된 품)
- 조작자나 책임 기관은 시스템의 올바른 동작을 확인할 의무가 있다.
- 승인되지 않거나 적합하지 않은 소모품, 혹은 여러 목적의 장비 및 액세서리의 사용은 부상이나 기타 손상의 원인이 된다.
- 제조자는 승인되지 않거나 적합하지 않은 소모품 혹은 장비 및 액세서리를 사용하여 발생한 부상이나 기타 손상에 대해 의무나 법적 책임이 없으며 불필 보증을 하지 않는다.

나. 연료, 산성, 고압성분해 관련 주의사항

- 혈액의 원활한 이동을 위해 ATR120 Reservoir를 혈액 지침보다 아래에 위치시킨다.
- 피할 수 없는 악성 중압이 있는 경우 사용을 제한한다.
- 배터디, 과산화수소, 증류수, 물, 알코올, 비강구 투여기 금지된 항생제, 피브리노겐, Avitan 또는 플라젠 예외 상태를 포함하는 혈액에는 사용을 제한한다.
- 피할 수 없는 고압, 태번, 소변, 정자와 위의 물질, 담즙, 양수에 오염된 물질에 사용을 제한한다.

**다. 부주의에 따른 주의사항**

- 타 차의 일회용 소모품과 함께 사용할 경우 환자에게 위험이 발생할 수 있다.
- ATR120 Reservoir를 설치할 때는 신의 고집, 휘둘림 또는 기타 방해요소를 없애기 위해 상당한 주의를 기울여야 한다. 설치된 후에는 잘 배치되었는지 다시 확인한다.
- 플라스틱 부분은 다양한 용액, 세제 그리고 다른 화학물질에 의해 손상 받는다. 손상된 일회용 소모품을 사용 하지 않는다.

**■ 포장단위**

1EA, BEA/BOX

**■ 저장방법**

항상 청결하고 건조하고 통풍이 잘되며 직사광선을 피할 수 있는 공간에 5°C ~ 30°C 온도에서 보관한다.

**■ 사용기간**

제조일로부터 3년

**■ 수입일자**

상호: 프레스비디우스카비코리아(주)  
주소: 서울특별시 송파구 백제고분로99, 8층, 9층 (잠실동, 애들타운)

**■ 제조원**

제조원명: Fresenius Kabi AG 61346 Bad Homburg, Germany (독일)  
제조자: Carretera Sanchez Km 18.5 Parque Industrial Itabo, Zona Franca Ind. de S.C.,  
Haina, DOMINICAN REPUBLIC (도미니카 공화국)

9308471-H01-01
정부문서 작성 연월: 2023.12